

Réglage de la fréquence du champ magnétique et de la durée grâce à la liste des indications :

Indications	Fréquences	Applicateur	Intensité * progressive	Durée
Abrasions de la peau	10 HZ	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Anémie liée au stress	2 HZ	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Arthrite aiguë	2 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Arthrite chronique	20 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Atteinte aux glomes	10 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15min
Atteintes	10 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Avant la compétition	24 Hz	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Bronchite asthmatique	10 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Brûlures	14 Hz	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Bursite nuchale	10 HZ	Couverture + Protège encolure	de 20 à 100 %	20 min
Capelet	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Cardiomyopathies - stimulation de système de circulation	6 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Claquage de tendon	24 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Coliques	10 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Contractions musculaires	20 Hz	Protège encolure/Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Contusion du sabot	10 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Contusions	24 Hz	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Cornage	24 Hz	Protège encolure/Couverture	de 20 à 100 %	10 min
Coup de sang	10 Hz	Protège encolure/Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Coup de soleil	12 Hz	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Coupures	12 Hz	Protège encolure / Couverture / Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Déchirure du périnée	2 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Dérèglements hormonaux	10 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Dysplasies de la hanche	24 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Engorgement des membres	20 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Eparvin	24 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Eparvin mou	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Eponge (hygroma du coude, bursite)	4 HZ	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Exostose	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Faiblesse du tendon fléchisseur	20 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Fracture osseuse	24 Hz	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Harper	10 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Infection urinaire	2 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Inflammation de la colonne vertébrale	4 Hz	Protège encolure + Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Inflammation de l'articulation du boulet	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Inflammation de l'os du canon	2 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Inflammation de l'os sésamoïde	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Inflammation des articulations du carpe	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Inflammation des mamelles	4 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Inflammation du tendon fléchisseur	2 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Inflammation des gencives	4 Hz	Protège encolure	de 20 à 100 %	15 min
Jarde	24 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Malandres	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Myoglobinurie	8 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Otite	4 Hz	Protège encolure	de 20 à 100 %	20 min
Plaie de selle/plaie de sangle	14 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Plaies	12 Hz	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Post-traitement et traitement complémentaire de tumeurs	18 Hz	Protège encolure/Couverture/Guêtre	de 20 à 100 %	20 min
Pourriture de la fourchette	10 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Récupération après une compétition	2 Hz	Couverture + Protège encolure	de 20 à 100 %	20 min
Sinusite	4 Hz	Protège encolure/Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Souffle court (asthme chronique)	4 Hz	Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Tendinite	4 HZ	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Tying-up	10Hz	Protège encolure/Couverture	de 20 à 100 %	20 min
Vessigon	4 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min
Zone de croissance osseuse (inflammation-suros)	20 Hz	Guêtre	de 20 à 100 %	15 min

Important !!! Veuillez observer impérativement les contre-indications (avertissements) avant le traitement.
La thérapie par champs magnétiques constitue une thérapeutique complémentaire et un soutien à la médecine conventionnelle et elle doit être considérée comme telle. Elle ne remplace pas une consultation chez un vétérinaire.

